



VERHINDERN MIT

SANFTEM DRUCK DAS AUSLAUFEN

DER MUTTERMILCH



## MAMMA PADS

### *Die clevere Stilleinlage*

Die Mamma Pads sind völlig neuartige Stilleinlagen aus hautfreundlichem Silikon, die einen natürlichen Körperreflex nutzen: Durch fast unmerklichen Druck auf die Brustwarzen verhindern sie zuverlässig das Auslaufen wertvoller Muttermilch in den Stillpausen. Ab jetzt bekommt Ihr Baby die ganze, gute Milch. Und Sie dürfen sich freuen, dass Bluse oder T-Shirt trocken und fleckenfrei bleiben.

### *Neue Freiheiten genießen*

Weil die Mamma Pads keine Feuchtigkeit absorbieren müssen wie klassische Stilleinlagen, sind sie wirklich hauchdünn. Das macht sie nahezu unsichtbar, selbst bei körperbetonter Kleidung oder transparenten Dessous. Probieren Sie es aus, zum Beispiel beim Schlafen ohne BH in warmen Nächten oder unter dem neuen, hautengen Top.

Super praktisch: Einmal angelegt, haften die Mamma Pads zuverlässig ohne Verrutschen - prima beim Joggen mit der Freundin oder beim Babyschwimmen.

## Sparen und schützen

Mamma Pads helfen cleveren Sparern, denn bei korrekter Pflege\* lassen sie sich über 150mal verwenden. Außerdem produzieren Sie mit den Mamma Pads deutlich weniger Müll als mit Einweg-Stilleinlagen und schützen dadurch unsere kostbare Umwelt. So geht Stillen im respektvollen Einklang mit der Natur.

## Sanft und sicher

Die blütenförmigen Silikon-Stilleinlagen passen sich wie eine zweite Haut praktisch jeder Brustform und -größe an. Eine hauchdünne, medizinische Haftschrift auf der Innenseite der Pads sorgt Tag und Nacht für perfekten Halt und Sicherheit. Ultrareine, atmungsaktive Silikone garantieren einen Tragekomfort, der dem natürlichen Hautgefühl so nahe kommt, dass Sie glatt vergessen könnten, überhaupt Stillpads zu tragen.

\* Die Pads einfach nach jeder Nutzung mit warmem Wasser und nicht rückfettender Seife reinigen, dann an der Luft trocknen lassen. Stark kalkhaltiges Wasser oder häufiges Trocknen in staubiger Umgebung können die Lebensdauer der Mamma Pads verkürzen.

## Tipps für die Anwendung

Die besten Erfahrungen mit den Mamma Pads machen Frauen mit gut ausgeprägten Brustwarzen und einem normalen Milchdruck, und das schon ab der 2. bis 6. Lebenswoche des Babys. Viele Mütter nutzen die Silikon-Stilleinlagen besonders begeistert in der Abstillzeit. Bei sehr kleinen Brustwarzen oder hohem Milchdruck zu Beginn der Stillzeit empfehlen sich manchmal eher herkömmliche Marken-Stilleinlagen.

Am besten, Sie machen Ihren persönlichen Mamma Pads-Test. Und sollte es nicht klappen, probieren Sie es einfach zu einem späteren Zeitpunkt wieder.\*\*

Mehr interessante Informationen zu Anwendung und Pflege erhalten sie auf [www.theraline.de](http://www.theraline.de).

Querschnitt durch einen Mamma Pad



\*\* Weil die Mamma Pads manchmal aufgrund körperlicher Gegebenheiten nicht optimal funktionieren, geben wir eine Zufriedenheitsgarantie: Sollten Sie das Produkt zurückgeben wollen, erstattet der Handel Ihnen auch bei bereits benutzten Pads den vollen Kaufpreis.



## MEHR FREUDE AM STILLEN DANK MAMMA PADS

- Keine Flecken mehr auf der Kleidung durch auslaufende Milch
- Ideal unter engen Outfits
- Unverzichtbar beim Sport & Schwimmen
- Schlafen ohne BH, kein Verrutschen
- Atmungsaktiv und selbsthaftend
- Jetzt über 150mal wiederverwendbar

## PRODUKTINFORMATION

### MAMMA PADS

Außenmaß: ø ca. 9 cm, Stärke ca. 2,7 mm

Material: Silikon

Pflege: abwaschbar, kochbar

Besonderheiten: schadstofffrei, atmungsaktiv, hauchdünne Haftschrift